


¿CÓMO CARGAR UN INFUSOR EN 2 PASOS?

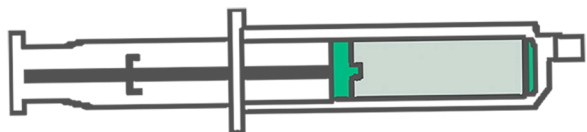


Jeringa con el fármaco/solución a cargar

CLAMP CERRADO

1

Apoyando el émbolo en una superficie plana, dura y limpia, empujar hacia abajo el cuerpo de la jeringa para cargar su contenido al infusor

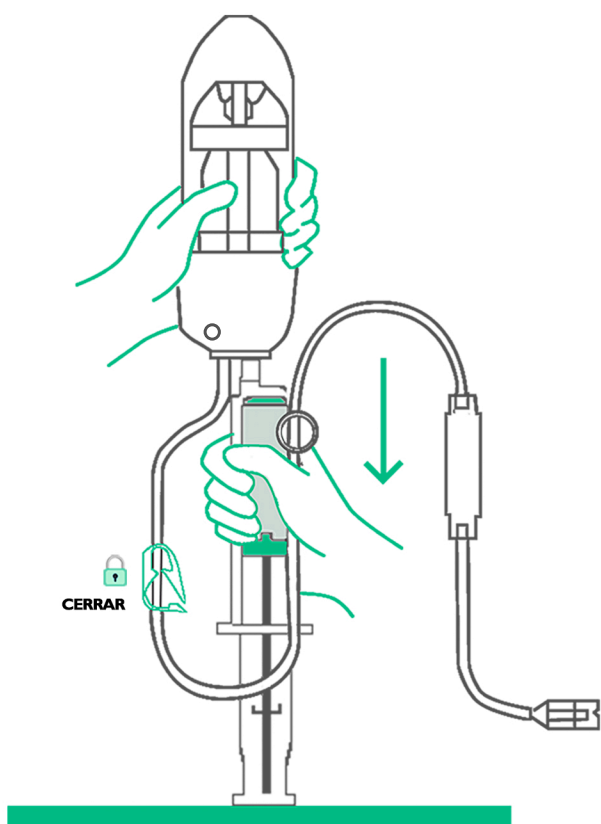


⚠ La presión solo se tiene que ejercer sobre la jeringa

CLAMP ABIERTO

2

Dejar que se purgue el prolongador del infusor hasta el final asegurando que la flecha del filtro apunte hacia arriba

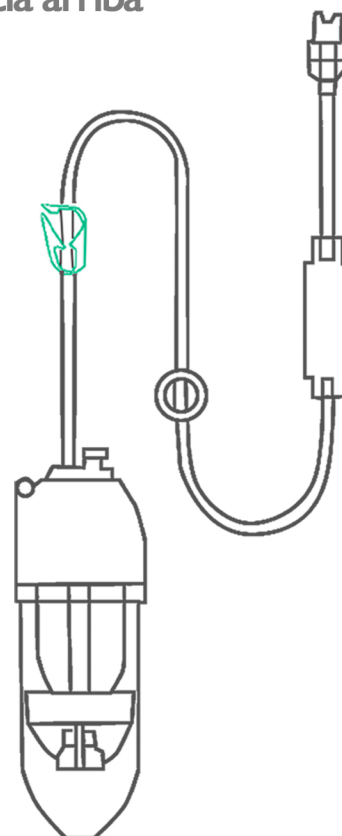

⚠ Este paso debe hacerse siempre con diluyente

PARTES DEL INFUSOR

